



新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗体迅速検査キット

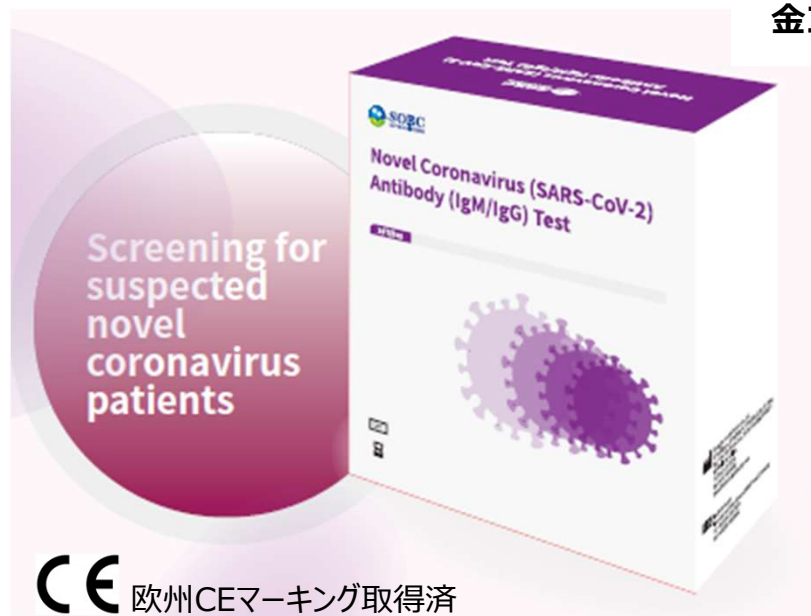

金コロイドイムノクロマトグラフィー法の利点

- ・血液の必要量は約10μℓ
- ・1つのカセットでIgM/IgGを併せてモニタリング
- ・測定時間は10～15分
- ・高価な装置は不要
- ・室温(4℃～30℃)冷暗所保存

定価 ¥46,000 / 20test

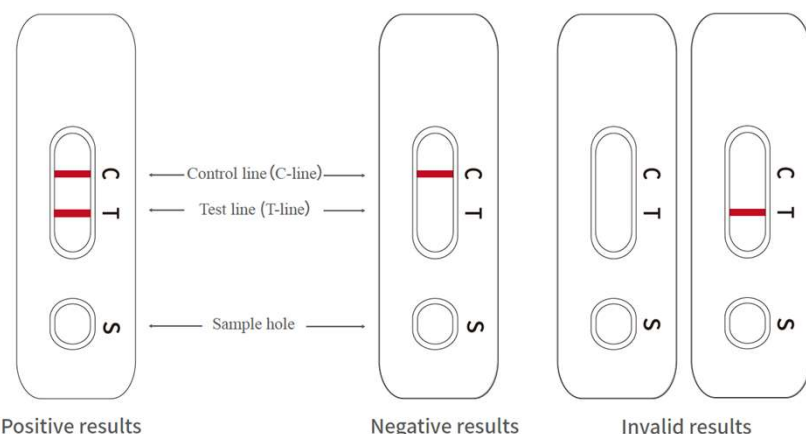

【試験結果】


※ 中国での600例の臨床試験データ取得

陰性検出率： 315/319; 98.75%

陽性検出率： 252/281; 89.68%

総検出率： (315+252)/600; 94.50%

本キットは、IgMとIgG両タイプの抗体を併せて検出します。併せて測定する（右図緑線）ことにより、信頼性の高い結果が得られます。

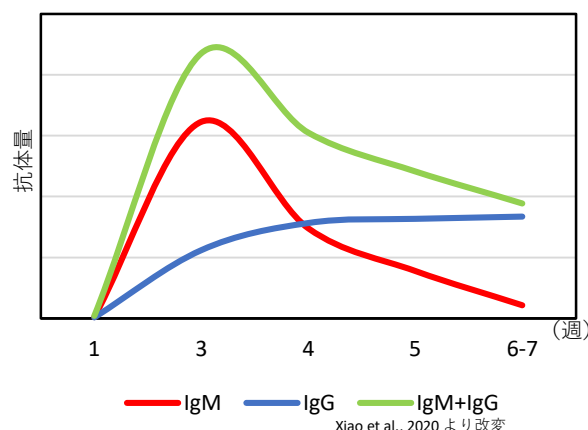

製品名	規格	保存条件
新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) 抗体迅速検査キット	20 テスト/箱	4 ~ 30℃ 冷暗所

※本研究用試薬は、現在体外診断用医薬品として承認、認証を受けておらず、診断目的での使用はできません。



JTEC CORPORATION


<https://www.j-tec.co.jp/>




RT-PCRとの比較

	本キット	RT-PCR
検出物質	IgM/IgG抗ウイルス抗体	核酸
サンプルタイプ	血漿/血清/全血	鼻咽頭スワブ/痰/歯槽
測定時間	10～15分	約2時間
必要な装置	必要ありません	必須
使用法	診断サポート	診断の確認

抗体反応イメージ図

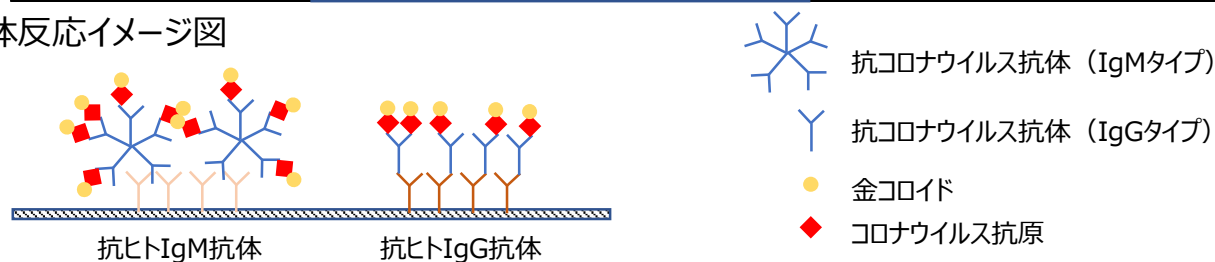


STEP 1

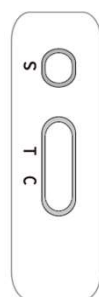


アルミホイルの袋から
カートリッジを取り出し
水平に置きます。

STEP 2

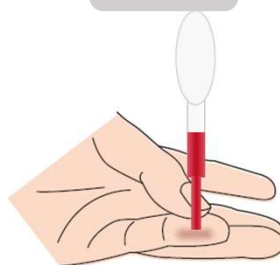

穿刺針を用いて、採取部位に針を刺す。
血液を優しく絞り出し、スポイトにより採
取する。
泡が入らないように注意する。
(穿刺針は付属しておりません。)

STEP 3

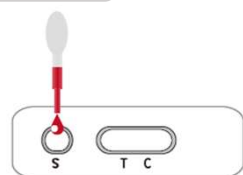


約10 μ l程の血液を
検査カートリッジの
サンプルホールに滴下します。

測定中



10～15分で結果が出ます。

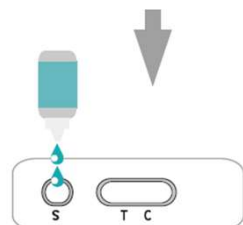

緩衝液を2滴(約70 μ l)
滴下します。

＜キット内容＞ 20回分
・検査用カートリッジ ・緩衝液
・専用スポイト

【注意】

- ・サンプル量が適量でない場合、判定ラインの発色が弱いことがあります。
- ・全血を使用する場合、溶血が起きたサンプルは使用しないでください。

株式会社ジェイテックコーポレーション

〒567-0086

大阪府茨木市彩都やまぶき2丁目5番38号

TEL : (072)655-2786(営業部) FAX : (072)643-2391

E-mail : info@j-tec.co.jp